

MODALITES PRATIQUES POUR RECHERCHE DE TRICHINE CHEZ LE SANGLIER

(Version 9 septembre 2025)



COÛT ANALYSE TRICHINE
POUR 1 SANGLIER

12 € TTC Environ

MODALITES :

- Prélever 100 Grammes minimum de pilier de diaphragme.
(A défaut, muscle de membre antérieur ou langue)
- Identifier le prélèvement (N° du bracelet)
- Glisser le prélèvement dans un sac congélation ETANCHE, parfaitement fermé et IDENTIFIE avec le N° du bracelet.
- Compléter la « FICHE D'ACCOMPAGNEMENT D'ANALYSES TRICHINE » fournie par le laboratoire TERANA 18 (Cf fiche suivante)
- **CONSERVER VOTRE PRELEVEMENT AU FRAIS** (Température de +5°C) jusqu'au dépôt au Laboratoire TERANA 18 (Transport en glacière)
- Déposer votre prélèvement directement à l'accueil du laboratoire TERANA18 – 216 Rue Louis MALLET à Bourges - Du lundi au vendredi - 8h30/12h00 et 13h30/17h (Résultat le mardi midi pour un dépôt le lundi matin)
- Pour analyser plusieurs sangliers dans un même envoi, il faut préparer et identifier chaque prélèvement séparément, et les stocker dans des sacs de congélations séparés.

TERANA 63 – Fiche de demande d'analyses trichines sur sangliers

TERANA PUY DE DOME
20 rue Aimé Rudel – BP 42 MARMILHAT – 63370 LEMPDES
TEL : 04-73-90-10-41 MAIL : puydedome@labo-terana.fr

FICHE D'ACCOMPAGNEMENT DES PRELEVEMENTS DANS LE CADRE
DE LA RECHERCHE DE LARVES DE TRICHINE
Analyses selon la norme NF EN ISO 18743

Cadre réservé au laboratoire

Expéditeur : Nom et adresse : Téléphone : Mail : Prélèvements effectués et transmis par :			Facturation: Destinataires des résultats : ☐ Expéditeur ☐ Payeur ☐ Autre :		
Espèce	Site de prélèvements des muscles (site préférentiel en gras)	Quantité à fournir	N° scellés	Références/Identification	Conservation
Sanglier	☐ Pilier du diaphragme ☐ Langue ☐ Membre antérieur	100 g 200g si congelé			☐ Réfrigéré ≤ 7j ☐ Congélation < 30j
Sanglier	☐ Pilier du diaphragme ☐ Langue ☐ Membre antérieur	100 g 200g si congelé			☐ Réfrigéré ≤ 7j ☐ Congélation < 30j
Sanglier	☐ Pilier du diaphragme ☐ Langue ☐ Membre antérieur	100 g 200g si congelé			☐ Réfrigéré ≤ 7j ☐ Congélation < 30j
Sanglier	☐ Pilier du diaphragme ☐ Langue ☐ Membre antérieur	100 g 200g si congelé			☐ Réfrigéré ≤ 7j ☐ Congélation < 30j
Sanglier	☐ Pilier du diaphragme ☐ Langue ☐ Membre antérieur	100 g 200g si congelé			☐ Réfrigéré ≤ 7j ☐ Congélation < 30j
Sanglier	☐ Pilier du diaphragme ☐ Langue ☐ Membre antérieur	100 g 200g si congelé			☐ Réfrigéré ≤ 7j ☐ Congélation < 30j

Date d'abattage :/...../..... Date d'expédition :/...../.....
 Date des prélèvements :/...../..... Température de conservation des prélèvements :°C
 Personne ou service assurant l'acheminement des prélèvements : ☐ agent Terana ☐ autre :
 Signature de l'agent en charge des prélèvements :

A compléter par le laboratoire destinataire : Tampon du labo : Date de réception :/...../.....	A compléter par le laboratoire destinataire : Présence de scellé : ☐ oui ☐ non Echantillons individualisés : ☐ oui ☐ non Conservation +5°C : ☐ oui ☐ non Observation :
---	---

Référence : T63-FORM-057

Révision : 01

Date

d'application :

05/09/2022

Page 1 sur 1